

Gebrauchsanweisung

Vit-A-Vision®

Augensalbe mit Vitamin A und Dexpanthenol – Ohne Konservierungsmittel

Beschreibung

Vit-A-Vision® ist eine konservierungsmittelfreie Augensalbe, die neben Vitamin A, Vitamin E und Dexpanthenol Vaseline, dickflüssiges Paraffin, Wollwachs, Cetylstearylalkohol und gereinigtes Wasser enthält.

Vit-A-Vision® wird zur lang anhaltenden Verbesserung des Tränenfilms und zum intensiven Schutz der Augenoberfläche angewendet. Seine zellprotektiven Eigenschaften ermöglichen eine normale Reepithelisierung, wenn diese durch Trockenheit beeinträchtigt ist.

Durch die sehr weiche und geschmeidige Konsistenz lässt sich Vit-A-Vision® sehr gut auf der Augenoberfläche verteilen. Die Salbe zeichnet sich durch besonders gute Verträglichkeit aus, vor allem durch das darin enthaltene Vitamin A, einem natürlichen Bestandteil des Tränenfilms. Vit-A-Vision® lindert Symptome wie Brennen, Trockenheit oder Müdigkeit der Augen. Die Augenlider gleiten problemlos über Horn- und Bindehaut.

Dexpanthenol, das im Körper zu Pantothenensäure umgewandelt wird, gehört zu den B-Vitaminen. Dexpanthenol erhöht die Wasserbindungskapazität, es wird gut von der Haut aufgenommen und besitzt pflegende Eigenschaften.

Vit-A-Vision® bewirkt eine lang anhaltende Linderung der Symptome Trockenheit, Reizungen und leichte Irritationen, insbesondere

- bei Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch oder
- bei Müdigkeit und Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder langen Autofahrten oder
- bei mechanischer Beanspruchung, z. B. durch das Tragen von harten oder weichen Kontaktlinsen oder durch diagnostische Eingriffe am Auge.

Anwendung

Vit-A-Vision® wird üblicherweise 3 mal täglich zur lang anhaltenden Verbesserung des Tränenfilms und zum intensiven Schutz der Augenoberfläche angewendet. Besonders zu empfehlen ist die Anwendung am Abend vor dem Zubettgehen, so dass die Salbe eine intensive lang anhaltende Wirkung am gereizten Auge entfalten kann.

Schrauben Sie die Schutzkappe ab, legen Sie den Kopf leicht in den Nacken, ziehen Sie das Unterlid etwas vom Auge ab. Bringen Sie durch leichten Druck auf die Tube einen ca. 0,5 cm langen Salbenstrang in den Bindehautsack ein. Schließen Sie langsam die Augen. Nach der Anwendung die Tube wieder sorgfältig verschließen.

Eine Anwendung sollte kontinuierlich über mehr als 30 Tage erfolgen.

Packungsgröße

Eine Tube enthält 5 g Augensalbe.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

Nach der Anwendung kann vorübergehend verschwommenes Sehen auftreten; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.

Nicht anwenden bei

- Infektionen des Auges
- bestehender Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Augenarzt, wenn die Irritationen und Reizungen bestehen bleiben sollten.

Vit-A-Vision® sollte nicht während des Tragens von Kontaktlinsen angewendet werden.

Wenn außer Vit-A-Vision® noch andere Augenpräparate angewendet werden, sollte zwischen der Anwendung von Vit-A-Vision® und den anderen Augenpräparaten ein ausreichender Zeitabstand von ca. 30 Minuten liegen. Verwenden Sie Vit-A-Vision® in diesem Fall **nach** der Verabreichung der weiteren Augenpräparate.

Das Auge oder die Gesichtshaut mit der Tubenspitze nicht berühren, um Infektionen oder Verletzungen des Auges zu vermeiden.

Ein Knicken oder Aufrollen der Tube sollte vermieden werden, um die Tube nicht zu beschädigen.

Lagerung

Bei Raumtemperatur lagern. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Nach Anbruch 3 Monate verwendbar.


Vit-A-Vision® für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Gebrauchsanweisung

März 2016

 **Hersteller**
OmniVision GmbH
Lindberghstraße 9
82178 Puchheim
Deutschland
Telefon: +49 89 840792-30
Telefax: +49 89 840792-40
www.omnivision.de
info@omnivision.de

Vertrieb Österreich
OmniVision GmbH
Anton Anderer Platz 6
1210 Wien
Österreich

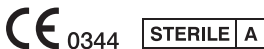

OmniVision® GmbH, Lindberghstraße 9, 82178 Puchheim, Deutschland
www.omnivision.de, info@omnivision.de